



Wonderlift®

design your face & body



www.wonderlift.de

INHALTSANGABE

Wonderlift Einleitung	Seite 1
Behandlungsarten	
Meso Lifting	Seite 2 - 3
Myo Lifting	Seite 4 - 5
Bodyforming	Seite 6 - 7
Meso Body	Seite 8 - 9
Dermopunktur	Seite 10 - 11
Laser	Seite 12 - 13
Behandlungsprodukte	
Young Basic Creme	Seite 14 - 15
Young Basic Reinigung	Seite 16 - 17
Biomoleküle	Seite 18 - 19
Behandlungsschritte	Seite 20 - 21
Gesichtsmuskeln	Seite 22
Technische Daten	Seite 23
Notizen	Seite 24

Sicherlich hat jeder schon mal bemerkt, dass sich unser Lebensstil entscheidend auf unser Wohlbefinden und unsere Ausstrahlung auswirkt.

Zu einem pfleglichen Lebensstil gehört aber auch der Umgang mit dem eigenen Körper. Wer sich wohlfühlt, kann sicher auftreten und wirkt attraktiv. Das Bewusstsein um die eigene Attraktivität sind in unserer heutigen Gesellschaft zu wahren Erfolgsgaranten geworden.

Aber kein Mensch ist vor dem natürlich einsetzenden Alterungsprozess gefeit. Mit der Zeit verliert die Haut an Spannkraft und Elastizität - das Ergebnis sind Falten.

Dem entgegen wirken die verschiedenen Behandlungen des Wonderlifts.

Herzlich willkommen bei der Wonderlift GmbH

Wonderlift GmbH entwickelt Computer gesteuerte Behandlungsarten für die Kosmetik und stellt hochwertige Kosmetikprodukte her, die im Zusammenspiel mit den Behandlungen zum Erfolg führen.

Durch dieses Konzept erlangen unsere Kunden ein Produkt, das unvergleichbar ist und die Gewissheit, selbst genauso erfolgreich zu werden.

Denn nur wenn unsere Kunden erfolgreich sind, sind wir das auch!

Wonderlift Erfolg:

- *Wonderlift und Produkte Made in Germany*
- *Abgestimmte Produkte auf die Behandlungen*
- *Die besten Behandlungen im Bereich Anti Aging und Body Forming in einem System*
- *Beste Wirtschaftlichkeit durch Produktkonzept*
- *Mehr als 2000 zufriedene Endkunden, das beste Qualitätssiegel!*



Meso Lifting

Behandlungszonen & Anwendung

Mit dem Meso-Programm lassen sich sowohl Gesichtsbehandlungen als auch Körperbehandlungen durchführen.

Anwendung gegen:

Falten, Couperose, Unreinheiten, erschlafftes Gewebe, Altersflecken und Inflamm-Aging.

Behandlungstechnik

Bei der Meso-Behandlung wird mit Hilfe der Meso-Rollelektrode das Mesofluid eingeschleust. Üblicherweise verwendet man hierfür die Hyaluronsäure. Je nach Hautzustand kann aber auch Gingko- oder Aloe-Gel verwendet werden.

Wirkungsweise

Bei der Meso- Lifting- Behandlung wird die Hautbarriere durch kurzzackige Impulse geöffnet und in Bruchteilen von Sekunden werden die Wirkstoffe eingeschleust.

Durch dieses Verfahren ist es möglich, in kürzester Zeit große Mengen (z.B. Hyaluronsäure) zum Aufpolstern in die untersten Hautschichten einzuschleusen.

Die Wirkstoffe des Meso-Lifting-Fluid werden direkt in die Feuchtigkeitsspeicher der Subcutis transportiert. Dort reparieren, polstern und unterfüttern diese die Haut wirkungsvoll von innen nach außen.





Als zusätzlicher Wirkstoff entspannt und glättet Hexapeptid die Haut. Bedingt durch die vermehrte Durchblutung werden Zellen aktiviert, besser versorgt und die Collagenbildung angeregt.

Bei regelmäßiger Anwendung nehmen Stärke und Tiefe von Fältchen und Falten ab. Der Teint wird frischer, samtiger, besser durchblutet, wirkt gesünder und attraktiver.

Die Haut gewinnt wieder ihre Spannkraft, Frische und Straffheit zurück. Sie wirkt strahlend und sichtbar jünger.

Myo Lifting

Behandlungszonen & Anwendung

Bei der Myo-Lifting-Behandlung können alle mimischen Gesichtsmuskeln einzeln behandelt werden. Je nach Problemzonen kann man den Schwerpunkt auf unterschiedliche Muskelgruppen legen. Z. B. Beseitigung von Schlupfliedern und erschlaffte Wangen

Anwendung gegen:

Falten, Couperose, Unreinheiten, erschlafftes Gewebe, Altersflecken und Inflamm-Aging.

Behandlungstechnik

Bei der Myo-Behandlung fährt man mit zwei Handelektroden entlang der Gesichtsmuskeln. Als leitendes Gel, welches gleichzeitig eingeschleust wird, verwendet man in der Regel Collagen. Je nach Hautzustand kann aber auch Ginkgo- oder Aloe-Gel verwendet werden.

Wirkungsweise

Die Myo-Programme laufen in verschiedenen Phasen ab, der Unterschied liegt dabei in der Einstellung der Frequenz. Die Behandlung beginnt mit einer Vorbereitungsphase, um die verspannten Muskeln zu lockern.





Die zweite Phase zielt darauf ab die Muskulatur gezielt zu stärken, das heißt, degenerierte Muskeln werden langfristig wieder aufgebaut und können mehr Wasser speichern.

Man erhält ein pralleres Hautbild, wodurch letztlich auch die Falten geglättet werden.

Zugleich unterstützt der Einsatz von Collagen die Bildung collargener Fasern.

Poly-Shape

Behandlungszonen & Anwendung

Z.B. Bauch, Po und vieles mehr.

Anwendung gegen:

Cellulite, erschlafftes Gewebe und erschlaffte Muskeln.

Behandlungstechnik

Nachdem ein Programm angewählt wurde, erscheint eine schematische Darstellung der Körperstelle die behandelt werden soll. Aufgrund der Nummerierung der einzelnen Kabel ist es nun kinderleicht die Elektroden an den richtigen Stellen des Körpers zu befestigen.

Die Behandlungen laufen komplett eigenständig ab, wobei die Kosmetikerin nun Zeit hat sich mit anderen Aufgaben zu beschäftigen. Die Behandlungszeiten sind von Programm zu Programm unterschiedlich. Sie liegen zwischen 20 und 45 min.

Wirkungsweise

Das Aktionspotential der Muskulatur wird bei den Behandlungen auf 80% erhöht, im Gegensatz zum Fitnessstraining, wo es nur bei 30-40% liegt. Dadurch erreicht man eine enorme Steigerung des Glucoseverbrauchs in Blut und Muskulatur. Wodurch wiederum die Lipolyse schneller einsetzt, nämlich schon nach 15min. Bei normalem Training setzt der Fettstoffwechsel erst nach 30min ein.





Zudem finden die Impulse in einer 300 mal wechselnden Abfolge statt. Das heißt, das bei einer Behandlung bis zu 300 unterschiedliche Trainingseinheiten auf den Muskel übertragen werden. Somit findet durch diese neuromuskuläre Stimulierung nicht nur ein allgemeiner Muskelaufbau statt, sondern auch eine Umfangreduzierung von mindestens 1-3 Zentimetern pro Behandlung. Zu alledem findet bei jeder unserer Behandlungen im Bereich Körper eine Lymphdrainage statt, infolge der rhythmischen Muskelkontraktionen.

Eine solche Lymphdrainage ist extrem wichtig, da sie das Gewebe entschlackt, entwässert, entstaubt und dabei hilft die Nahrungsfette ins Blut abzutransportieren.

Meso Body

Behandlungszonen & Anwendung

Es können alle mit Cellulite betroffenen Körperstellen behandelt werden. Die häufigsten Körperstellen sind: Oberschenkel, Po, Bauch etc.

Anwendung gegen:

Cellulite, erschlafftes Gewebe, erschlaffte Muskeln.

Behandlungstechnik

Mit der Meso-Rollelektrode wird im Meso-Body-Programm 15min lang, mindestens eine Menge von 20ml, des Meso-Body-Gels eingeschleust.



Wirkungsweise

Bei der Meso-Body-Behandlung wird der Abbau und die Ausstoßung der Fettstoffe aus der Zelle begünstigt. Außerdem wird die Durchblutung gefördert wobei die betroffenen Stellen wieder richtig mit Nährstoffen versorgt werden können.

Produktbeschreibung

Das Meso-Body-Gel wurde speziell für die Meso-Body-Behandlung entwickelt. Die enthaltenen Wirkstoffe sind Koffein und ein spezieller Algenextrakt (*Laminaria hyperborea*). Das Koffein entwässert das Gewebe und aktiviert ein Enzym, das Fett spaltet und beim Abbau hilft. Durch diese Kombination wird das Unterhautfettgewebe reduziert.



Der Algenextrakt ist dazu fähig einen lipolytischen Effekt durch einen Mechanismus zu erreichen, der sich mit traditionellen lipolytischen Wirkstoffen vergleichen lässt.

In Verbindung mit Koffein unterstützt und verbessert er die Eliminierung der Fettzellen.

Dermapunktur

Behandlungszonen & Anwendung

Anwendung:
Falten beseitigen durch Aufbau der Lederhaut.

Behandlungstechnik


Die Handhabung der Dermapunktur ist ebenso genial wie kinderleicht: Eine sehr dünne, sterile Einwegnadel wird flach in die Falte geschoben. Dann muß nur noch die Intensität so eingestellt werden, wie sie dem jeweiligen Hauttyp und pH-Wert entspricht. *Den Rest macht der Wonderlift.*

Wirkungsweise

Dermapunktur ist eine der spektakulärsten Neuentwicklungen, speziell konzipiert für das moderne Kosmetikstudio.

Basierend auf Erkenntnissen aus der traditionellen Akupunkturbehandlung in Verbindung mit Erfahrungen neuester Reizstromforschung wurde eine Methode der Faltenbehandlung entwickelt, die sich durch sofort sichtbare und anhaltende Ergebnisse auszeichnet, und dabei absolut risikofrei zu handhaben und leicht zu erlernen ist.

Dermapunktur ist universell bei jeder Art von Falten einsetzbar. Um bestmögliche Resultate zu erzielen, wurde eine Kombinations Methode herausgefunden, die zweierlei leistet, siehe rechts.

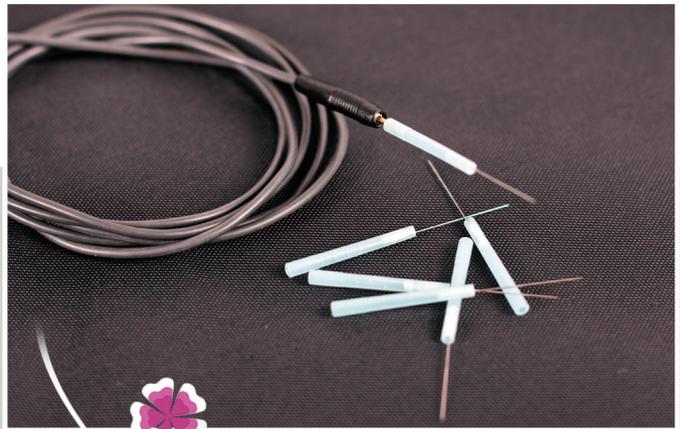



1. Als Sofortreaktion wird Gewebeflüssigkeit angezogen, als Reaktion des Körpers auf den leichten Brennschmerz.

2. Als zelluläre Langzeitreaktion werden Repairmechanismen und Stoffwechsel von einem überlagerten Bio-Impuls in der Derma angeregt.

Als weitere Wirkung werden derzeit auch reflektorische Einflüsse diskutiert. Fest steht jedoch, daß die in der Lederhaut befindlichen Fibroblasten direkt stimuliert werden und mehr Fasereiweiße wie z.B. Collagen produzieren.

Laser

Behandlung & Methode

Zur Akupunkt-Stimulation das betreffende Programm, z.B. Starlifting wählen. Die zu bestrahlenden Punkte werden Bild für Bild angezeigt. Einfacher geht es nicht.

Rubinrotes Laserlicht versorgt müde Zellen mit neuer Lebensenergie und regt über die Energiebahnen der Akupunktur sogar innere Organe an.

Anwendung gegen:

Falten, Couperose, Unreinheiten, erschlafftes Gewebe, Altersflecken und Inflamm-Aging.



Wirkungsweise

Photonen machen Zellen fit

Der Laser erzeugt ein rubinrotes, sehr intensives und gebündeltes Licht, welches die Oberhaut durchdringt und in der Subcutis absorbiert wird.

Da die Lichtteilchen (Photonen) im roten Spektrum schwingen, regen sie die biologischen Prozesse aller lebenden Zellen an.

Speziell die Mitochondrien, die man auch als die Kraftwerke der Zellen bezeichnen könnte, werden zur erhöhten Freisetzung von Lebensenergie angespornt.





Aus diesem Grund bietet es sich an, den Laser zur Stimulation von Akupunkten zu verwenden, da die freigesetzte Energie über die Meridiane den betreffenden Organen zugute kommt.

Darüber hinaus wird Laserlicht auch zur Flächenbestrahlung gealterter Haut eingesetzt, da es dort die Collagenbildung anregt.

Repair-Mechanismen werden beschleunigt und die Durchblutung gesteigert.

Young-Basic Creme

Der Y-Factor: Revolution in der Gesichtspflege

Im Rahmen umfangreicher Grundlagenforschung über die Heilung von Verbrennungswunden, entwickelte ein Team von internationalen Wissenschaftlern einen Wirkstoff-Komplex der die Hauterneuerung fördert.

Während der Forschung haben die Wissenschaftler entdeckt, dass der Wirkstoff-Komplex nicht nur für Verbrennungswunden geeignet ist, sondern auch neue Maßstäbe im Kampf gegen Falten setzt.

Die besondere Tiefenwirkung von YOUNG-BASIC mit Y-Factor ist das wunderbare Ergebnis intensiver Forschungsarbeit unter der Leitung von Prof. med. Milos Chvapil an der Universität Tucson, Arizona.

Das Wirkungsprinzip dieser Creme ist der Natur abgeschaut.

Wachsen und Gedeihen der Haut wird von innen durch Nährstoffe bestimmt. Gleichzeitig muss aber auch genügend Kraft vorhanden sein, um schädliche Einflüsse von außen abzuwehren.

YOUNG-BASIC mit Y-Factor liefert beides, die Kraft zum Wachsen und die Kraft zur Abwehr von Schadstoffen.





Das Wichtigste ist die Regeneration. 16 Inhaltsstoffe, die den hauteigenen Substanzen gleichen, ermöglichen durch ihre exakt aufeinander abgestimmte Kombination eine deutliche Verbesserung der Zellqualität.

YOUTH - Factor = JUGEND

Durch sein extrem niedriges Molekulargewicht ist der Y-Factor, Jugend- Faktor in der Lage, tief in der Haut den Erneuerungsprozess der Zellen zu aktivieren und somit den Alterungsprozess der Haut positiv zu beeinflussen.

Young-Basic Reinigung

Reinigen nicht Waschen!

Wer richtig reinigt, hat eine klare und reine Haut. Waschen entfernt nur den oberen Schmutz, aber die Unreinheiten und die Schadstoffe bleiben auf der Haut.

Reinigen ist viel mehr! Schadstoffe beseitigen, Verhornungen abnehmen, Poren öffnen, den natürlichen Hautschutz erhalten, Säuren binden und zu guter Letzt Faltenbildung vorbeugen.

Young Basic Cleansing Gel

Das Young Basic Cleansing Gel und die Reinigungsmilch holen auf sanfte Art fast alle Schadstoffe von der Haut.

Die Poren werden weit geöffnet um eine reichhaltige Wirkstoffaufnahme zu sichern und um der Haut wieder Feuchtigkeit zuführen zu können. So bleibt die natürliche Schönheit der Haut erhalten.

Anwendung:

Eine erbsengroße Menge mit lauwarmen Wasser einmassieren und abspülen. Empfehlung: Führen Sie diese Reinigung zwei Mal durch um alle Schadstoffe zu eliminieren.





Young Basic Freshener

Unser Wasser enthält chemische Stoffe und reizauslösende Salze. Um diese zu entfernen benötigt man ein gutes Gesichtswasser.

Der Young Basic Freshener erledigt diese Aufgaben perfekt. Zusätzlich stabilisiert er die Hautlipide und stärkt somit die eigene Barrierefunktion der Haut.

Süßholzwurzelextrakt und Panthenol beruhigen die Haut und wirken entzündungshemmend.

Anwendung:

Geben Sie den Freshener auf ein Wattepad und tupfen Sie die Haut ab.

Young Basic Peeling

Das Young Basic Peeling mit rund abgeschliffenen PE- Partikeln entfernt auf sanfte Weise abgestorbene Hautschüppchen.

Das Ergebnis ist ein ebenmäßiges Hautbild. Die Anwendung sollte einmal pro Woche erfolgen.

Anwendung:

Eine erbsengroße Menge mit lauwarmen Wasser kreisförmig einmassieren und gründlich abspülen.

Bio-Moleküle

Body-Inform Gel

Es können alle mit Cellulite betroffenen Körperstellen behandelt werden. Die häufigsten Körperstellen sind: Oberschenkel, Po, Bauch etc.

Anwendung:

Einmal täglich, bevorzugt abends nach dem Duschen, eine Walnuss große Menge auf die betroffene Körperstelle mit kreisenden Bewegungen einmassieren.



Produktbeschreibung & Wirkungsweise

Die enthaltenen Wirkstoffe fördern den Fettabbau in der Zelle. Zugleich wird die Durchblutung angeregt wobei Wärme entsteht. Die auftretende Rötung verschwindet nach kurzer Einwirkzeit wieder.

Die enthaltenen Wirkstoffe des Body-Inform-Gels sind Koffein, ein spezieller Algenextrakt (*Laminaria hyperborea*), Benzylnicotinat und Rosmarinöl.

Das Koffein entwässert das Gewebe und aktiviert ein Enzym, das Fett spaltet und beim Abbau hilft.

Durch diese Kombination wird das Unterhautfettgewebe reduziert

Der Algenextrakt ist dazu fähig einen lipolytischen Effekt durch einen Mechanismus zu erreichen, der sich mit traditionellen lipolytischen Wirkstoffen vergleichen lässt.

In Verbindung mit Koffein unterstützt und verbessert er die Eliminierung der Fettzellen. Das Benzylnicotinat fördert die Durchblutung und erzeugt Wärme. Das Rosmarinöl fördert ebenfalls die Durchblutung.

Hyaluron/ Meso Fluid

Hyaluronsäure ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers, unter anderem der Haut. Die für die Haut herausragendste Eigenschaft des Hyalurons ist seine Fähigkeit, in großen Mengen Wasser speichern zu können.

Hyaluron verleiht der Haut durch seine Wasserbindungskraft ihr Volumen und damit ihr gesundes und junges Aussehen.

Collagen Gel

Collagen ist verantwortlich für Elastizität, Festigkeit und den richtigen Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Es mindert mimische Falten und wirkt somit dem Alterungsprozess entgegen.

Da Collagen an dem ständigen Wiederaufbau der Zellen beteiligt ist, werden Pigmentationen verbessert, und Narben sowie Dehnungsstreifen geglättet.

Aloe Vera Gel

Das Naturprodukt Aloe Vera besitzt eine feuchtigkeitsspendende Wirkung. Durch ihre antiseptische Eigenschaft eignet sich die Aloe Vera auch hervorragend zur Wunddesinfektion und beschleunigt obendrein die Zellerneuerung und dadurch den Heilungsprozess.


Ginkgo Biloba Gel eignet sich für die durchblutungsarme und empfindliche Haut. Es stärkt die Gefäße und hat eine ausgleichende Wirkung bei Couperose.

Es fördert den Zellaufbau und die Durchblutung der Haut, wodurch die Haut wieder frischer aussieht. Durch die entzündungshemmende Wirkung von Ginkgo wird die Haut zusätzlich geschützt.

Behandlungsschritte

1. Schritt : *Phase Entspannung*


Die Handstücke werden von der Mitte nach Außen gezogen.

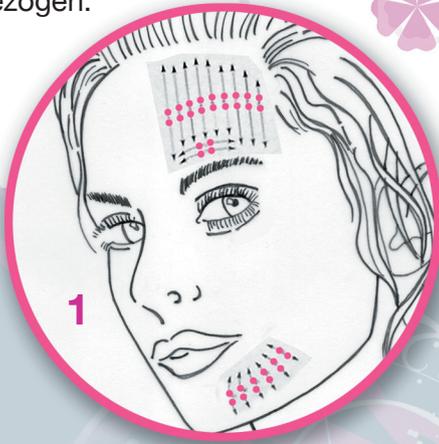

PHASE ENTSPANNUNG

2. Schritt : *Phase Entspannung*

Ein Handstück bleibt fest stehen, das andere gleitet zum ersten hin. Anschließend wird eine Lymphdrainage durchgeführt.

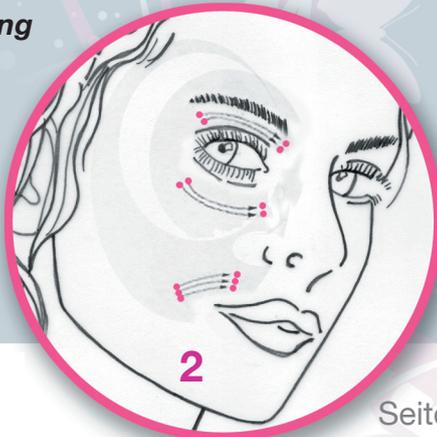




PHASE STRAFFEN



3. Schritt : Phase Straffen

Phase wechseln in
Straffen
(Enter drücken)

Die Punkte werden
mit den Handrücken
4 Sekunden gehalten.

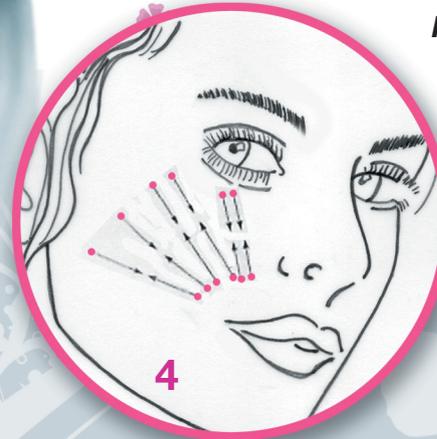

4. Schritt : Phase Straffen

Beide Handstücke
schieben eine
Hautwulst zur
Mitte und halten
diese kurz fest.




5. Schritt : Phase Straffen

Das obere Handstück bleibt
auf einem Punkt stehen.
Das untere Handstück
schiebt eine Hautwulst
nach oben und hält diese
kurz fest. Abschließend
werden die Handstücke
flach aufgelegt und
schieben eine Hautwulst
nach oben.

Gesichtsmuskeln

- 1. Frontalis:** Hebt die Augenbrauen und die Stirnfalten.
- 2. Occipitalis:** Arbeitet zusammen mit der Frontalis, um die Augenbraue zu heben.
- 3. Temporalis:** Hebt und schließt den Kiefer und die Kinnlade, zieht die Kinnlade zurück, beißt die Zähne zusammen, zieht die Haut der Schläfe zurück.
- 4. Auricularis Anterior:** Zieht das Ohr auf- und vorwärts.
- 6. Orbicularis Oculi:** Schließmuskel, schließt das Augenlid, drückt auf die Tränensäcke.
- 7. Depressor Supercilii:** Senkt die Augenbraue.
- 8. Corrugator:** Zieht die Augenbrauen herunter und zur Mitte, verursacht drohende Stirnfalten.
- 9. Procerus:** Zieht den mittleren Winkel der Augenbrauen abwärts.
- 10. Nasalis-Compressor Naris:** Drückt die Nasenlöcher in Richtung Septum.
- 11. Levator Labii Superioris Nasi:** Hebt die Oberlippe und dehnt die Nasenlöcher.
- 12. Levator Labii Superioris:** Hebt den Mundwinkel.
- 13. Zygomaticus Minor:** Hebt den Mundwinkel.
- 14. Zygomaticus Major:** Zieht den Mundwinkel abwärts und rückwärts.
- 15. Risorius:** Zieht den Mundwinkel nach hinten.
- 16. Platysma:** Drückt den Unterkiefer herunter, zieht den Mundwinkel zurück und drückt ihn herunter. Spannt die Nackenhaut.
- 17. Orbicularis Oris:** Zusammenpressen, Zusammenziehen und Verschieben der Lippen gegen die Zähne.
- 18. Depressor Anguli Oris:** Presst die Mundwinkel herunter.
- 19. Depressor Labii Inferioris:** Presst die Unterlippe herunter und zieht sie zur Seite.
- 20. Mentalis:** Hebt und schiebt die Unterlippe vor, kräuselt die Haut.
- 21. Buccinator:** Presst die Wangen (beim Pusten).

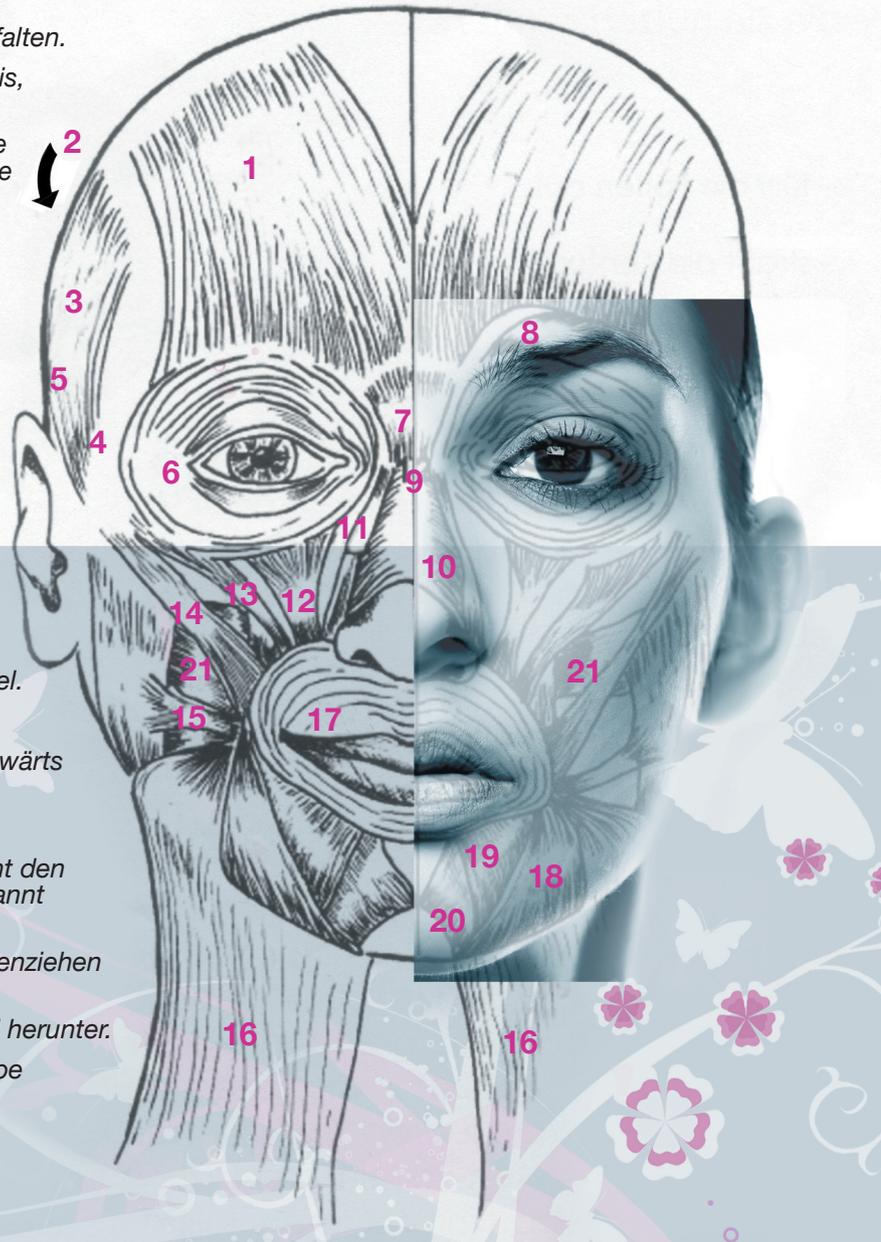

Technische Daten

Technische Daten Wonderlift

PC / Rechner:

Industriestandard IBM kompatibel mit TFT Monitor.
Impulseinheit 5.25 Zoll in Rechner integriert.

Datenübertragung:

CN1 Serielle Schnittstelle (RS-232)

Stromversorgung:

4-poligen Standart-Steckverbinder 12V.
Spannung darf zwischen 9 - 18 V liegen.

Stromaufnahme:

maximaler Ausgangsleistung (10 x 100 Hz Trapez) ca. 450 mA (5.4 W)
Bei inaktiven Ausgängen sinkt die Aufnahme auf ca. 45 mA (0.5 W)

Pulsgenerator-Schaltung:

Galvanisch von der Stromversorgung und der seriellen Schnittstelle getrennt.
Darüber hinaus sind die Poly-Shape- und Ionto- Ausgänge transformatorisch gegenüber der restlichen Schaltung getrennt. Die Isolationsspannungen und -kapazitäten betragen:

Versorgung - Gerät 3000 V 70pF

Schnittstelle - Gerät 3000 V 3 pF

Gerät - Polyshape-Ausg. 500 V 20 pF (je Kanal)

Ausgangssignale Poly-Shape / Isotone:

Die Ausgänge liefern Signale beliebiger Pulsform und Amplitude in den folgenden Grenzen:

Ausgangs-Spitzenstrom: max. 10 mA

Frequenz: 2..100 Hz

Ausgangssignale Myo / Ionto:

Die Ausgänge liefern Signale beliebiger Pulsform und Amplitude in den folgenden Grenzen:

Spitzenstrom Myo: max. 10 mA

Spitzenstrom Ionto: max. 24 mA

Leerlaufspannung: ca. 40 V

Frequenz: 2..500 Hz

Ausgangssignale Laser / Ultraschall:

Laser: 3 V 60 mA (Wellenlänge 670 nm)

Ultraschall: ca. 40 kHz Amplitude von 24 Vss.

Beide Ausgangssignale können mit einer Frequenz von 1..30 Hz moduliert oder dauernd eingeschaltet werden.

Notizen

Notizen





Wonderlift GmbH
Seelbacher Str. 22-24
57258 Freudenberg

Tel. 02 71 / 37 20 405

Fax 02 71 / 37 42 77

info@wonderlift.de

www.wonderlift.de